

R82[®] 


**Instrukcja użytkowania
leżaka stabilizacyjnego kąpielowego Manatee**




1. Przygotowanie do użytku

Manatee dostarczany jest złożony, aby zmniejszyć jego gabaryty podczas transportu. Aby przygotować go do użytku należy:

- 1) Nacisnąć przyciski zwalniające (A) po obu stronach i rozłożyć dolną część stelaża leżaka.
- 2) Nacisnąć przyciski zwalniające (B) po obu stronach i rozłożyć podparcie podudzi.
- 3) Nacisnąć przyciski zwalniające (C) po obu stronach i podciągnąć oparcie do góry.

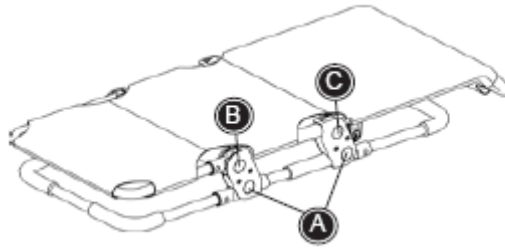

W tym momencie leżak jest gotowy do użytku.

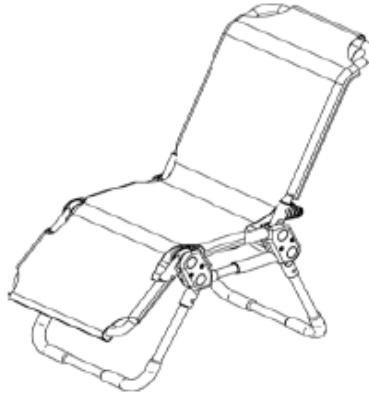


2. Odchylanie oparcia

Oparcie leżaka Manatee odchyła się indywidualnie. Aby odchylić oparcie należy:

- 1) Nacisnąć przyciski zwalniające (A) po obu stronach.
- 2) Odchylić oparcie (B) do żądanej pozycji.
- 3) Sprawdzić, czy obydwa przyciski (A) po odchyleniu znajdują się w zazębieniu.

Oparcie odchyła się także poprzez pociągnięcie paska z tyłu leżaka.

⚠Uwaga: Należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców między zawias rotacyjny i oparcie (C).

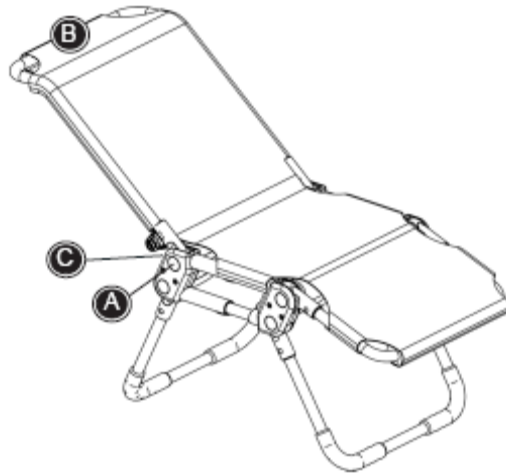

⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

3. Regulacja kąta podparcia podudzi.

Kąt podparcia podudzi reguluje się indywidualnie. Aby ustawić kąt pochylenia podparcia podudzi należy:

- 1) Nacisnąć przyciski zwalniające (A) po obu stronach.
- 2) Ustawić kąt podparcia podudzi (B) do żądanej pozycji.
- 3) Sprawdzić, czy obydwie przyciski (A) po odchyleniu znajdują się w ząbieniu.

Podparcie podudzi odchyła się także poprzez pociągnięcie paska pod leżakiem.



⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

4. Głębokość siedziska


Głębokość siedziska w Manatee (rozm. 0) można regulować w dwóch pozycjach:

- 1) Odkręcić śruby (A) po obu stronach kluczem imbusowym 4 mm.
- 2) Wymienić krótkie rurki na załączone długie. Dokręcić śrubami (A).



Aby wyregulować głębokość siedziska (rozm. 1 + 2) należy:

- 1) Poluzować śruby (B) po obu stronach kluczem imbusowym 4 mm
- 2) Wyregulować głębokość do żądanej pozycji poprzez wyciągnięcie ramy.
- 3) Dokręcić śruby (B).

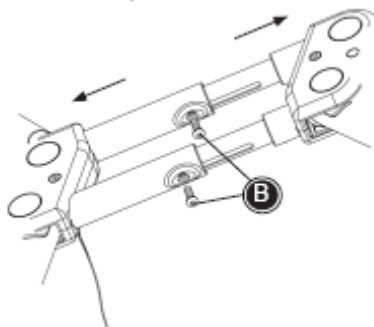


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

5. Wysokość siedziska

Wysokość leżaka można regulować poprzez zmianę położenia „nóg” (dolnego stelaża):

- 1) Nacisnąć przyciski zwalniające (A) p obu stronach.
- 2) Ustawić „nogi” (B) w żądanej pozycji.
- 3) Sprawdzić, czy wszystkie przyciski (A) po zmianie znajdują się w zazębieniu.

„Nogi” ustawić można także poprzez pociągnięcie paska pod siedziskiem.

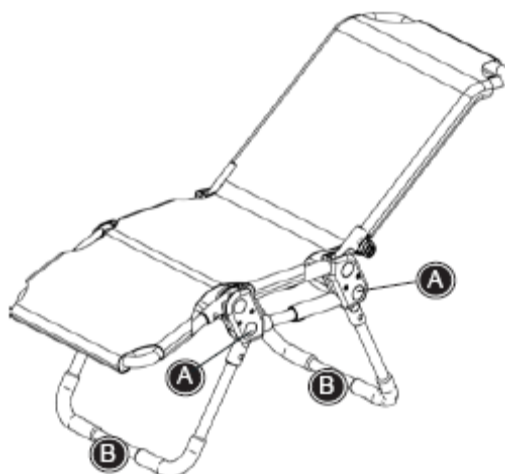


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

6. Regulacja kąta odchylenia siedziska

Aby wyregulować kąt siedziska należy:

- 1) Nacisnąć przyciski zwalniające (A) po obu stronach.
- 2) Ustawić kąt przedniej „nogi” (B) do żądanej pozycji.
- 3) Sprawdzić, czy wszystkie przyciski (A) po zmianie znajdują się w zazębieniu.

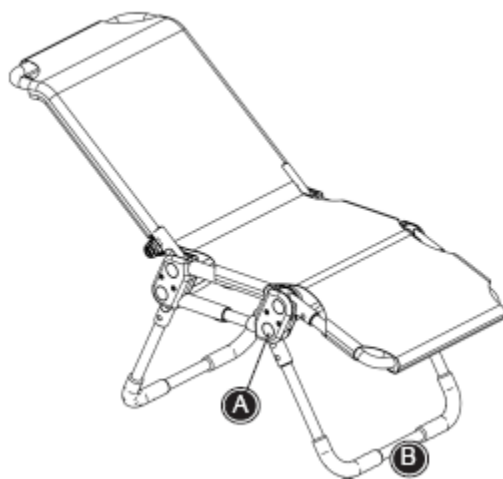


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.


7. Zagłówek / Pelota boczna

W wersji standardowej Manatee dostarczany jest z zagłówkiem / pelotą boczną. Pelota może być używana albo jako zagłówek albo jako pelota boczna. Aby poprawnie założyć pelotę należy:


1) Rozciągnąć pasek częścią spodnią do góry. Umieścić kliny na pasku w żądanej pozycji (A).

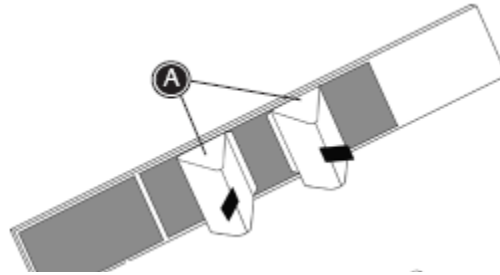

2) Złożyć końce paska i zamocować na klinach (B) paskami velcro.

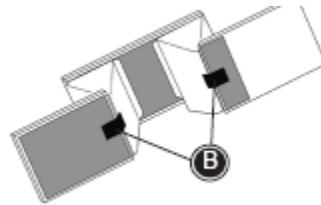

3) Odwrócić pasek - teraz jest gotowy do założenia (C).

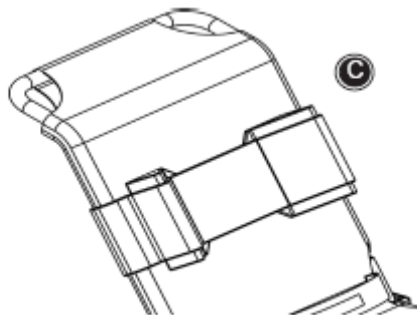

⚠Uwaga: Upewnić się, iż kliny są dobrze zamocowane na paskach velcro.

⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.


⚠Uwaga: Zagłówek / pelota boczna nie może być użytkowana jako długoterminowe podparcie. Została zaprojektowana, tylko jako ułatwienie podczas umieszczania dziecka w leżaku.

8. Pelota biodrowa


W wersji standardowej Manatee dostarczany jest z pelotą biodrową.

Aby poprawnie ją zamontować należy:

1) Włożyć pas do mocowań (A) po obu stronach leżaka.

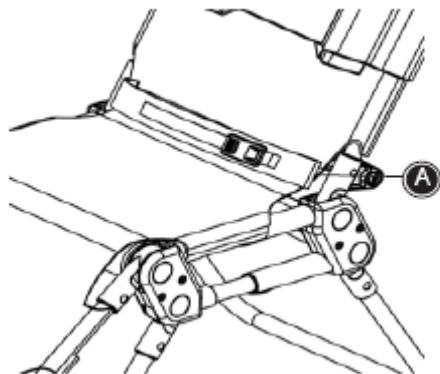

2) Pas biodrowy dopasowywany jest za pomocą paska velcro oraz zapięcia kłamrowego (B).

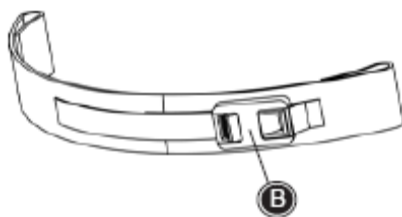


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

⚠Uwaga: Pelota biodrowa nie może być użytkowana jako długoterminowe podparcie. Została zaprojektowana, tylko jako ułatwienie podczas umieszczania dziecka w leżaku.

9. Pas tułowia (opcja)

Aby zamontować pas tułowia należy:

- 1) Przełożyć pas z zakończeniem velcro dokoła oparcia (A).
- 2) Umieścić dziecko w leżaku. Przełożyć pas dokoła ciała (B).
- 3) Dopasować paskiem velcro i zamknięciem kłamrowym (C).

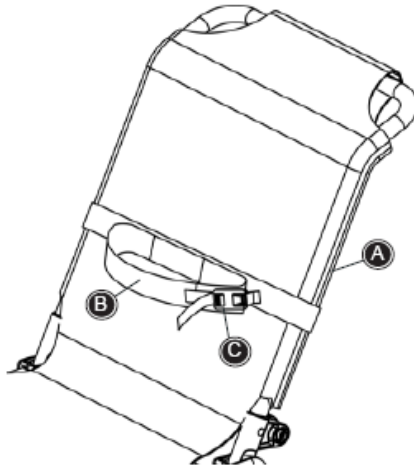


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

⚠Uwaga: Pas tułowia nie może być użytkowany jako długoterminowe podparcie. Został zaprojektowany, tylko jako ułatwienie podczas umieszczania dziecka w leżaku.

10. Klin z paskiem (opcja)

Aby poprawnie zamontować klin z paskiem należy:

- 1) Przełożyć klin z paskiem velcro pod siedziskiem (A).
- 2) Wyregulować klin (B) na boki, aby uzyskać optymalną pozycję

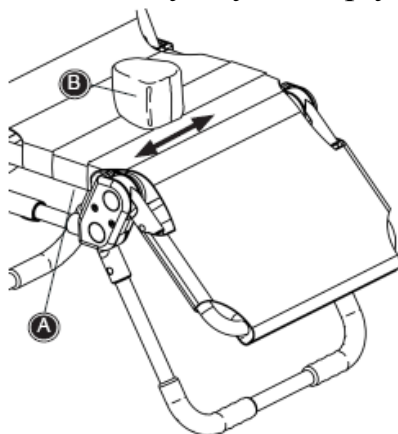


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

⚠Uwaga: Klin nie może być użytkowany jako długoterminowe podparcie. Został zaprojektowany, tylko jako ułatwienie podczas umieszczania dziecka w leżaku.

11.Paski podpierające podudzia (opcja)

Aby poprawnie zamontować paski do podparcia podudzi należy:

- 1) Przełożyć paski z velcro pod podparciem podudzi (A).
- 2) Wyregulować paski (B) na boki, aby uzyskać optymalną pozycję. Zamocować paskami velcro.

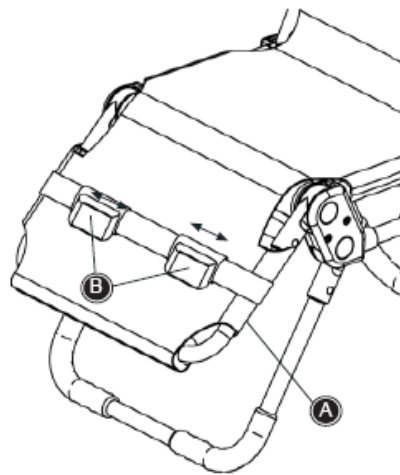


⚠Uwaga: W trakcie wykonywania regulacji należy zabezpieczyć leżak, a dopiero potem pozwolić dziecku w nim usiąść.

⚠Uwaga: Paski nie mogą być użytkowane jako długoterminowe podparcie. Zostały zaprojektowane, tylko jako ułatwienie podczas umieszczania dziecka w leżaku.

12.Montaż i demontaż pokrycia


W celu zdjęcia pokrycia należy:

- 1) Odpiąć zamek pokrycia z tyłu (A) i pod siedziskiem (B).
 - 2) Odpiąć paski velcro pod leżakiem (C) – pokrycie może być wyciągnięte (D) i zdjęte z leżaka.
- (Pokrycie można prać w pralce w temp. do 50⁰C)

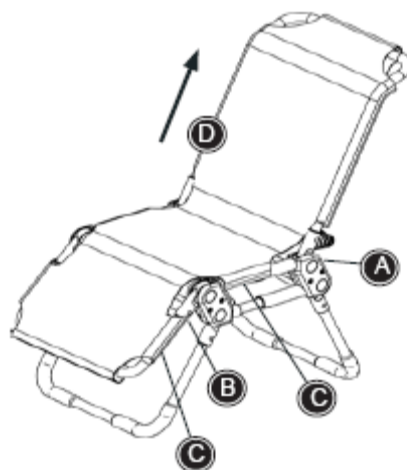

Aby ponownie założyć pokrycie na stelażu należy:

- 1) Włożyć pokrycie na oparcie i pociągnąć w dół (D). Upewnić się, że poduszki piankowe znajdujące się w pokryciu są umieszczone dokoła ramy.
- 2) Zapiąć zamek z tyłu leżaka (A).
- 3) Zapiąć małe kawałki pokrycia zamkiem pod siedziskiem (B). Upewnić się, że zakończenie velcro skierowane jest w dół
- 4) Spiąć podparcie podudzi (E) i zakończenie velcro pod siedziskiem (C) i pod podparciem podudzi (C). Upewnić się, że poduszki piankowe znajdujące się w pokryciu są umieszczone dokoła ramy.
- 5) Odchylić podparcie podudzi na dół (E) i upewnić się, że zakończenie velcro jest poprawnie zamocowane.

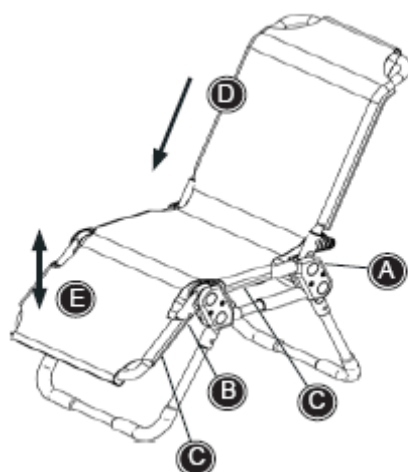

13. Rama z regulacją wysokości

Montaż kółek

- zamocować 4 kółka używając klucza nastawnego i dokręcić, aby zapewnić stabilne położenie

Regulacja ramy:

- poluzować śruby (A)
- rozłożyć ramę i podnieść do żądanej wysokości
- dokręcić ponownie śruby (A) na żądanej wysokości.



Umieszczanie leżaka na ramie:

- zablokować hamulce w kołach nogą
- umieścić tylną część leżaka (B) w uchwycie ramy (E), być może będzie konieczność użycia regulatorów (G), aby osiągnąć odpowiednią wysokość.
- umieścić przód leżaka (D) w drugim uchwycie ramy (C).

Uwaga:

Zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas składania lub rozkładania ramy.

Leżak musi być umieszczony na środku ramy, między dwoma gumowymi podporami (F). Upewnić się, że regulatory (G) „kliknęły” na miejscu. Przetestować leżak, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowany na ramie.

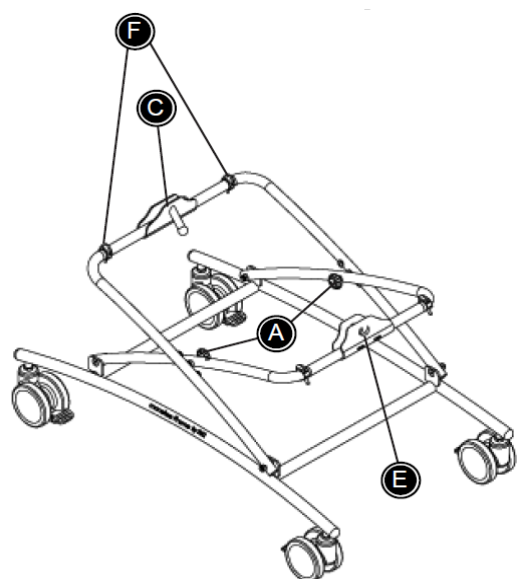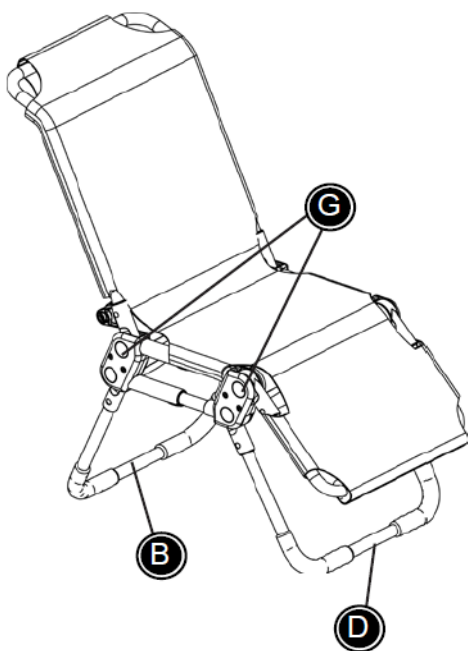

Producent:

R82 

Parallevej 3
8751 Gedved
DANIA

Dystrybutor:

akson 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 47
tel./fax: +48-32- 201 96 00